

Anleitung DNA-Test ONLINE - alte Charge

Du hast dein Testkit erfolgreich registriert und deine E-Mail-Adresse verifiziert. Folge nun bitte den weiteren Schritten.

Bitte beachte grundsätzlich:

- Die Konservierungslösungsflüssigkeit darf nicht eingenommen werden.
- Den Trichter vor Gebrauch nicht drehen.
- 30 Minuten vor der Probenentnahme **nicht essen, trinken, rauchen, Zähneputzen oder Kaugummi kauen.**
- Lagere dein Testkit bis zum Versand bei Raumtemperatur.

1. Probenentnahme

Spucke in den Trichter und sammle so lange Speichel, bis die Markierung auf dem Röhrchen erreicht ist. Dies kann einige Minuten Zeit in Anspruch nehmen.

Bitte beachte: Speichelblasen zählen nicht zur Gesamtprobenmenge. Warte gegebenenfalls bis sich die Blasen auflösen und setze die Entnahme danach fort. Wenn der Speichel schwer in das Röhrchen fließen sollte, schüttele es ganz leicht.

2. Entferne den Trichter

Ziehe den Trichter langsam nach oben, sodass sich die darin enthaltene Konservierungslösung mit deiner Probe vermischt. Halte das Röhrchen dabei aufrecht, sodass keine Flüssigkeit verloren geht. Bitte achte darauf, dass die ganze Konservierungslösung in das Röhrchen fließt. Du kannst den Trichter nun entsorgen.

3. Verschließe das Röhrchen

Unter dem Röhrchen befindet sich ein kleiner Deckel. Entferne diesen und verwende ihn zum Verschließen des Röhrchens. Achte darauf, dass deine Probe gut verschlossen ist.

4. Schüttele das Röhrchen

Schüttele das Röhrchen circa fünfmal, um sicherzugehen, dass sich Speichel und Konservierungslösung gründlich vermischen.

5. Versende deine Probe

Packe das Röhrchen in das beiliegende Saugpapier und lege es anschließend in die Tüte mit der Aufschrift „biohazard“. Lege es nun zurück in die durchsichtige Kunststoffschachtel.

Nun kannst du alles zusammen in das beiliegende voradressierte Kuvert legen.

HINWEIS EU-LÄNDER (z.B. Deutschland):

Schreibe dich als Absender auf das Kuvert und frankiere diesen ausreichend. Um die Zustellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, wähle die Versandart „Einwurf-Einschreiben“ und bewahre deinen Beleg gut auf. Sollte die Probe verloren gehen, tragen wir nach Vorlage des Versicherungsnachweises die Kosten für einen Ersatz.

HINWEIS NICHT-EU (z.B. Schweiz):

Da wir deine Versandrichtlinien nicht kennen (z.B. Schweiz Verzollung notwendig), können wir für den Rückversand keine Empfehlung aussprechen oder Haftung übernehmen. Wähle bitte im besten Fall eine Versandart, die der deutschen Versandart „Einwurf-Einschreiben“ entspricht. Sollte die Probe verloren gehen, tragen wir nach Vorlage des Versicherungsnachweises die Kosten für einen Ersatz.

6. Dein Ergebnis

Die Auswertung deines Tests nimmt in etwa 4-6 Wochen Zeit in Anspruch. Sobald dein Ergebnis vorliegt, wirst du per E-Mail benachrichtigt. Anschließend kannst du dein Ergebnis einsehen und als PDF-Datei herunterladen.

7. Dein Coaching

Du hast ein Coaching dazu gebucht? Melde dich bitte mit drei Terminvorschlägen per E-Mail (info@yourepi.de) bei uns, sobald dein Ergebnis vorliegt.

8. Kontaktdaten

Bei Fragen oder sonstigen Anliegen kannst du dich gerne per E-Mail (info@yourepi.de) oder Telefon (+49 841 938 932 90) an uns wenden.