

Anleitung DNA-Test ONLINE

Du hast dein Testkit erfolgreich registriert und deine E-Mail-Adresse verifiziert. Folge nun bitte den weiteren Schritten.

Bitte beachte grundsätzlich:

- Die Konservierungslösungsflüssigkeit darf nicht eingenommen werden.
- Putze deine Zähne und warten mindestens 15 Minuten bis zur Probenentnahme.
Während der Wartezeit darfst du **NICHT essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen.**
- Lagere dein Testkit bis zum Versand bei Raumtemperatur.

Probenentnahme

- 1 Spucke in den Trichter und sammle so lange Speichel, bis 2 ml Markierung auf dem Röhrchen erreicht ist. Dies kann einige Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Überfülle das Röhrchen nicht.

Bitte beachte: Speichelblasen zählen nicht zur Gesamtprobenmenge. Warte gegebenenfalls bis sich die Blasen auflösen und setze die Entnahme danach fort.

Gib die Konservierungs-Flüssigkeit (blauer Deckel) zu deiner Probe

- 2 Mische die Konservierungsflüssigkeit (preservation medium) mit deinem Speichel. Schraube den Deckel des beiliegenden anderen Röhrchens mit der Konservierungsflüssigkeit ab und gieße den Inhalt durch den Trichter zu der Speichelprobe.

Achtung: Bitte achte darauf, die Flüssigkeit nicht einzunehmen oder zu verschütten!

Verschließe das Röhrchen

- 3 Schraube den Trichter vorsichtig von der Speichelprobe ab und verschließe ihn mit dem blauem Deckel der Konservierungsflüssigkeit.

Vermische die Flüssigkeiten

- 4 Durch leichtes Schütteln des Röhrchens wird sichergestellt, dass sich deine Probe gründlich mit der Konservierungsflüssigkeit vermischt.

Versende deine Probe

- 5 Packe das Röhrchen in das beiliegende Saugpapier und lege es anschließend in die Tüte mit der Aufschrift „biohazard“. Lege es nun zurück in die durchsichtige Kunststoffschachtel. Das leere Röhrchen (preservation medium) kann entsorgt werden.

Nun kannst du alles zusammen in das beiliegende voradressierte Kuvert legen.

HINWEIS EU-LÄNDER (z.B. Deutschland):

Schreibe dich als Absender auf das Kuvert und frankiere diesen ausreichend. Um die Zustellung so reibungslos wie möglich zu gestalten, wähle die Versandart „Einwurf-Einschreiben“ und bewahre deinen Beleg gut auf. Sollte die Probe verloren gehen, tragen wir nach Vorlage des Versicherungsnachweises die Kosten für einen Ersatz.

HINWEIS NICHT-EU (z.B. Schweiz):

Da wir deine Versandrichtlinien nicht kennen (z.B. Schweiz Verzollung notwendig), können wir für den Rückversand keine Empfehlung aussprechen oder Haftung übernehmen. Wähle bitte im besten Fall eine Versandart, die der deutschen Versandart „Einwurf-Einschreiben“ entspricht. Sollte die Probe verloren gehen, tragen wir nach Vorlage des Versicherungsnachweises die Kosten für einen Ersatz.

Dein Ergebnis

- 6 Die Auswertung deines Tests nimmt in etwa 4-6 Wochen Zeit in Anspruch. Sobald dein Ergebnis vorliegt, wirst du per E-Mail benachrichtigt. Anschließend kannst du dein Ergebnis einsehen und als PDF-Datei herunterladen.

Dein Coaching

- 7 Du hast ein Coaching dazu gebucht? Melde dich bitte mit drei Terminvorschlägen per E-Mail (**info@yourepi.de**) bei uns, sobald dein Ergebnis vorliegt.

Kontaktdaten

Bei Fragen oder sonstigen Anliegen kannst du dich gerne per E-Mail (info@yourepi.de) oder Telefon (+49 841 938 932 90) an uns wenden.